


Installera appen

1 Slå på Bluetooth®

Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på Bluetooth-ikonen.

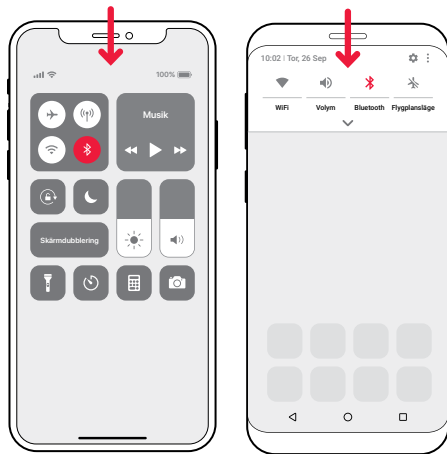

2 Installera Visitappen



Ladda ner **Bellman Visit**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.



Installera sändaren

3 Montera


Ta bort skyddsfilm från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen. Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

4 Starta

Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Statuslamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

5 Anslut

Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast elkontakten och koppla in adaptern i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanpropp enligt bilden.

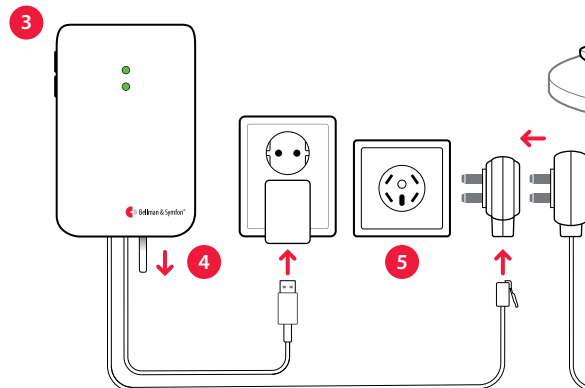


6 Testa mobilen

Be någon ringa till din mobil. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

7 Testa telefonen

Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

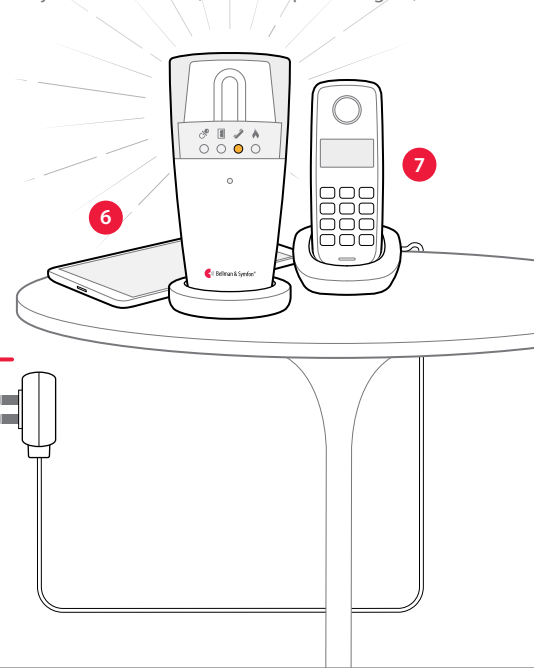

Använda appen

Det finns stunder på dagen då man inte vill bli störd av en massa signaler. Genom att välja en **Aktivitet** i appen kan du enkelt bestämma vad som skall resultera i en Visit-notifiering.



God morgon

Visit notifierar för både samtal och meddelanden under denna aktivitet. Välj den på dagen när du inte vill missa något.



Godnatt

Alla Visit-notifieringar är av under denna aktivitet. Välj den när du går och lägger dig, så att du kan sova ostört.



Filmkväll


Visit notifierar endast för samtal under aktiviteten. Välj den när du tittar på TV, så att du slipper bli störd av Visit-signaler mitt i ditt favoritprogram.



Middagsdags

Visit notifierar endast för meddelanden under aktiviteten. Välj den t.ex. vid middagen, så att du inte behöver tala i telefon med mat i munnen.

Du hittar fördjupad teknisk information, avancerade inställningar och felsökning i appens Hjälpsektion.

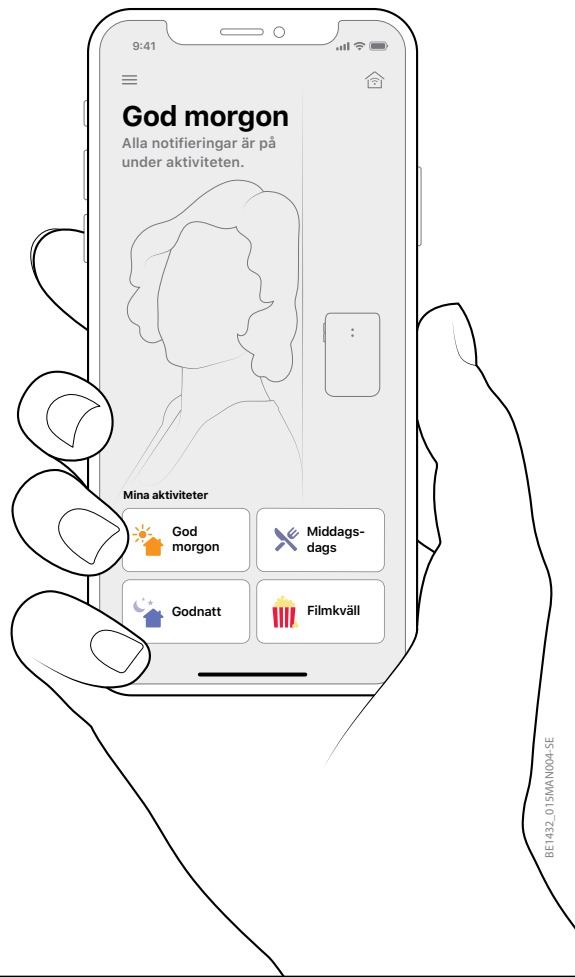

BE1432_013MAN1004-5E

Välkommen

Detta behöver du

- En mobiltelefon med iOS 11, Android 4.4 eller senare.

I förpackningen

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1 Telefonsändare | 4 Mellanpropp |
| 2 Strömkabel | 5 Skruv och plugg |
| 3 Telefonkabel | 6 Nätadapter |

