


# Visit väckarklocka



BE1580

## Knappar och reglage

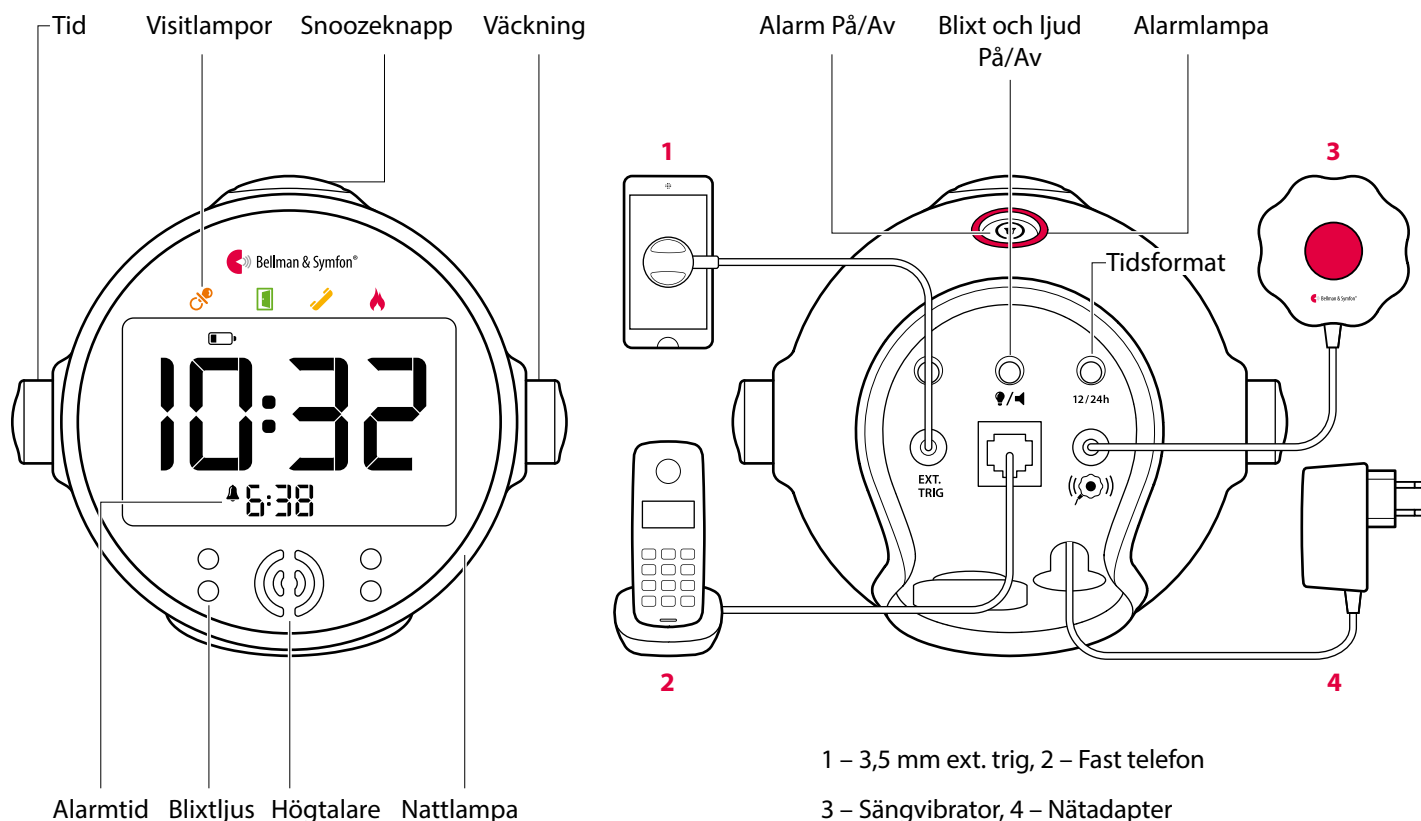

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1272 Sängvibrator med ljud
- Nätadapter
- 4 × 1,2 V AAA förmonterade batterier

### Ström och batteri

- Strömförsörjning  
7,5 V DC / 1000 mA  
Extern nätadapter
- Batterireserv  
4 × 1,2 V AAA NiMH  
uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv  
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv  
~ 16 h vid helt urladdat batteri

### Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

### Anpassningar

Mottagaren kan användas med följande Visitsändare och originaltillbehör:

#### Visitsändare

- BE1411 Visit dörrsändare
- BE1420 Visit tryckknappssändare
- BE1431 Visit telefonsändare
- BE1432 Visit mobiltelefonsändare
- BE1481/BE1551 Visit brandvarnare
- BE1555 Visit kolmonoxidvarnare
- BE1491 Visit babyvakt

### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator utan ljud
- BE9105 Telefonsladd
- BE9026 Trampmatta
- BE9250 Mobilsensor

### Signaler

- Ljudsignal  
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC  
Sängvibratorm avger ett ljud

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.30 MHz  
Räckvidd: 50 - 250 m beroende  
på byggnadens konstruktion och  
planlösning

# Visit väckarklocka

---

## Information om medicinteknisk utrustning

Tack för att du valt en produkt från Bellman & Symfon, ett världsledande företag inom varseblivning med huvudkontor i Göteborg. Läs denna information noga för att vara säker på att du förstår och får ut det mesta av din Bellman & Symfon-produkt. Hör av dig till din audionom om du vill veta mer om produktens funktioner och fördelar.

## Om Visit väckarklocka

### Avsedd användning


Den här enheten är en del av Visitsystemet. Systemets syfte är att uppmärksamma hörselskadade och döva personer på viktiga signaler hemmet. Väckarklockan är en Visitmottagare som väcker och notifierar dig med ljud, blyxtljus och vibrationer från den kompletterande sängvibratorn.

### Avsedd användare

Visitsystemet är utvecklat för dig som har en mild till grav hörselskada eller är döv och som har behov av ljud, syn- eller känsel förstärkning i hemmet.

### Så fungerar Visitsystemet

Visitsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är utplacerade i hemmet. När en sändare registrerar en aktivitet, signalerar den mottagaren som notifierar dig med ljud, blyxtljus eller vibrationer. För att kunna använda Visitsystemet behöver du ha minst en sändare och en mottagare.

 Visitsystemet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska förhållanden.

## Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö och inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges i denna information. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt bör den inte längre betraktas som pålitlig och ska därför bytas ut.

## Rengöring

Koppla ur eventuella kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Låt inte fukt komma in i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprej, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft. Enheten kräver ingen sterilisering.


## Service och support


Om produkten verkar skadad eller inte fungerar korrekt, följ instruktionerna i bruksanvisningen. Om enheten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din audionom för information om service och garanti.


## Viktig säkerhetsinformation


Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll bruksanvisningen för framtida användning. Om du enbart installerar enheten ska du ge bruksanvisningen till personerna som bor i hushållet.

### Varningar

 Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan medföra kroppsskada eller orsaka elektriska stötar, brand, skador på enheten eller annan egendom.

 Förvara alltid Visitmottagaren utom räckhåll för barn under 3 år.

 Observera att du kan missa larm och notifieringar om batterierna laddats ur.

 Använd eller förvara inte enheten nära värmekällor som öppna lågor, värmeelement, ugn eller andra värmeavgivande enheter.

# Visit väckarklocka

- ⚠ Blixtljus kan utlösa epileptiska anfall för personer med fotokänslig epilepsi (PSE).
- ⚠ Använd bara den typ av nätadapter och batteri som anges i bruksanvisningen.
- ⚠ Skydda elkablar från eventuella skador som kan uppkomma.
- ⚠ Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- ⚠ Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten får inte utsättas för fukt.
- ⚠ Ta inte isär eller modifiera enheten, det finns risk för elstötar! Manipulering eller demontering av enheten upphäver garantin.
- ⚠ Försök inte att manipulera enheten på något sätt. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon. Annars finns en risk för elstötar!
- ⚠ Batterier är giftiga. De får inte sväljas! Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Om batterierna sväljs, uppsök läkare omedelbart!
- ⚠ Använd kabeldiameter 26 AWG eller större för väckarklockans telefonuttag.

## Information om produktsäkerhet

- ⓘ Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på enheten och upphäva garantin.
- ⓘ Utsätt inte enhetens batterier för öppen eld eller direkt solljus.
- ⓘ Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas.
- ⓘ Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- ⓘ Enheten får endast repareras hos ett auktoriserat servicecenter.
- ⓘ Uppladdningsbara batterier får endast bytas av Bellman & Symfon eller ett auktoriserat servicecenter.
- ⓘ Risk för explosion föreligger om batterierna inte byts ut på rätt sätt.
- ⓘ Uppladdningsbara batterier skall laddas helt innan du använder enheten för första gången. Batterierna får endast laddas vid temperaturer mellan 0°– 35°C.
- ⓘ Om en allvarlig händelse inträffar i anknötning till den här enheten, kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- ⓘ Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, din lokala Bellman & Symfon-representant eller tillverkaren. Besök [bellman.com](http://bellman.com) för kontaktinformation.
- ⓘ Denna enhet får inte användas på flygplan annat än om tillåtelse ges av flygplanets besättning.

## Överensstämmelse

Bellman & Symfon försäkrar härmed att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745 samt nedanstående direktiv och förordningar. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfon eller lokal Bellman & Symfon-representant. Besök [bellman.com](http://bellman.com) för kontaktinformation.

Direktiv om radioutrustning	RoHS-förordningen
Förordning om medicinteknisk utrustning	REACH-förordningen
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet	EU:s allmänna produktsäkerhetsdirektiv
Elektriskt och elektroniskt avfall	EU:s batteridirektiv

### ISO-certifiering för tillverkare

Bellman är certifierade i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485

SS-EN ISO 9001 cert. nr: CN19/42071  
SS-EN ISO 13485 cert. nr: CN19/42070


### Certifieringsorgan

SGS United Kingdom Ltd  
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire  
CH65 3EN Storbritannien

# Visit väckarklocka

## Komma igång

- 1 Dra bort batterifliken och anslut nätadaptorn till väckarklockan och vägguttaget. Anslut sängvibratoren, lägg den under kudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.
- 2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- 3 En Visitlampa tänds på väckarklockan och den börjar ljuda och blixtra. Sängvibratoren vibrerar och avger ett ljud. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

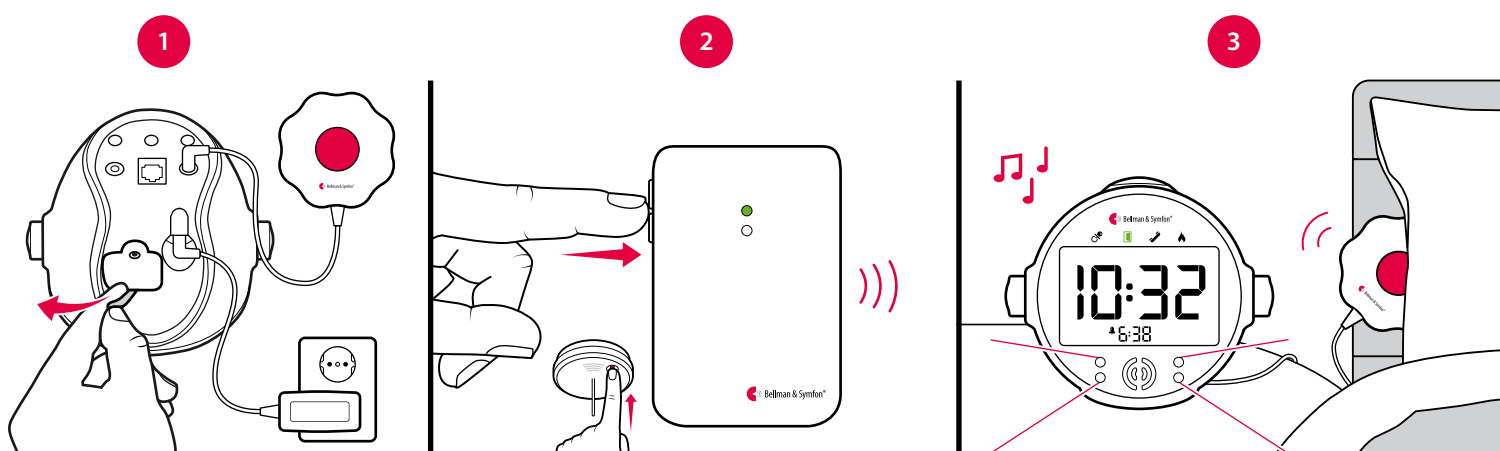

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar väckarklockan ljuda och blixtra och sängvibratoren vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare	Väckarklocka			Sängvibrator
<b>Aktiverad källa</b>	<b>Visitlampa</b>	<b>Ljud</b>	<b>Blixt</b>	<b>Vibration</b>
■ Dörrsändare/ tryckknappssändare	Grön	Dörrklocka	Ja	Långsam ■□□□
■ Telefonsändare / ansluten telefon	Gul	Ringsignal	Ja	Mellan ■□■□
■ Babyvakt	Orange	Babymelodi	Ja	Snabb ■■■■■□
■ Brandvarnare	Röd	Brandlarm	Ja	Lång ■■■■□

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Inställningar

### Blixt och ljud På/Av

Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

### Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen markerad med för att justera ljuset i 4 steg. **Steg 5 resulterar i att klockdisplayen lyser permanent.**


### Tidsformat

Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

# Visit väckarklocka


## Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

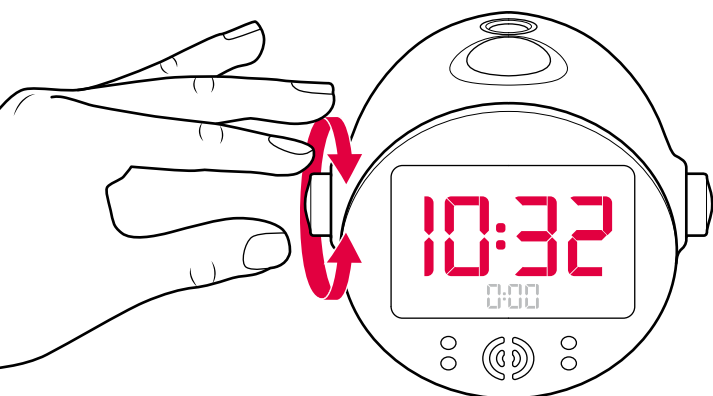


## Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

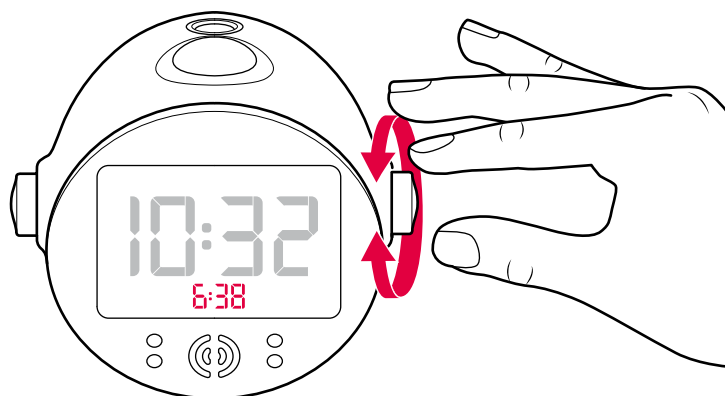


## Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.  
Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet,  
tryck på knappen igen.

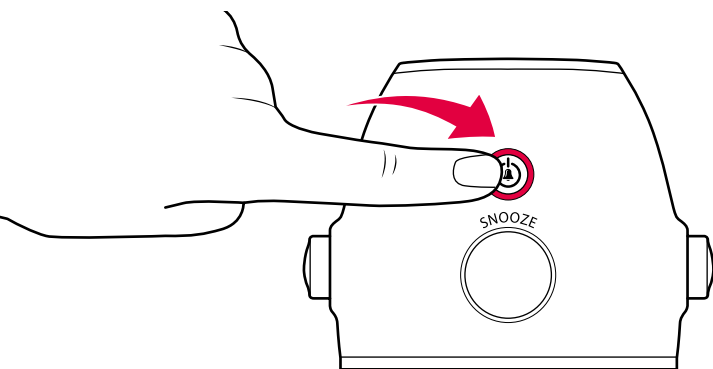

## Använda snooze och nattlampa


Tryck på snooze-knappen för att snooza.  
(Brandlarm kan inte snoozas av säkerhetsskäl).  
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända  
nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.

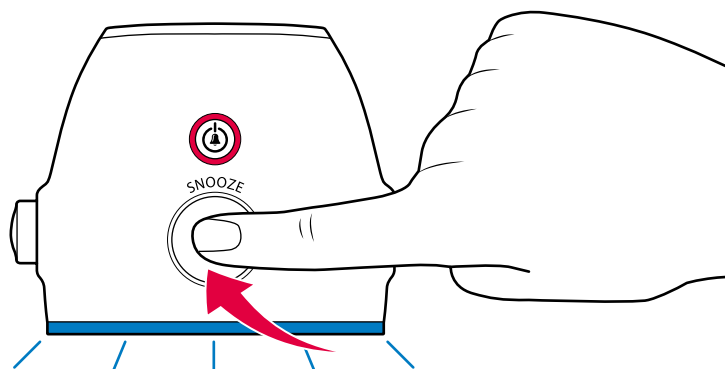

## Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE9250 Mobilsensor**  
Ställ den på mobilen eller surfplattan så visar väckarklockan när du får ett inkommande samtal eller meddelande.
- **BE9105 Telefonsladd**  
Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.
- **BE9026 Trampmatta**  
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig om din partner kliver ur sängen.

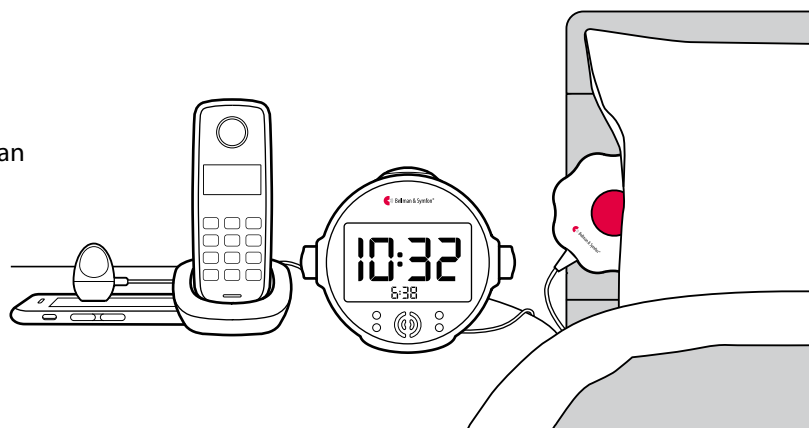



# Visit väckarklocka

## Byta radionyckel



Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:

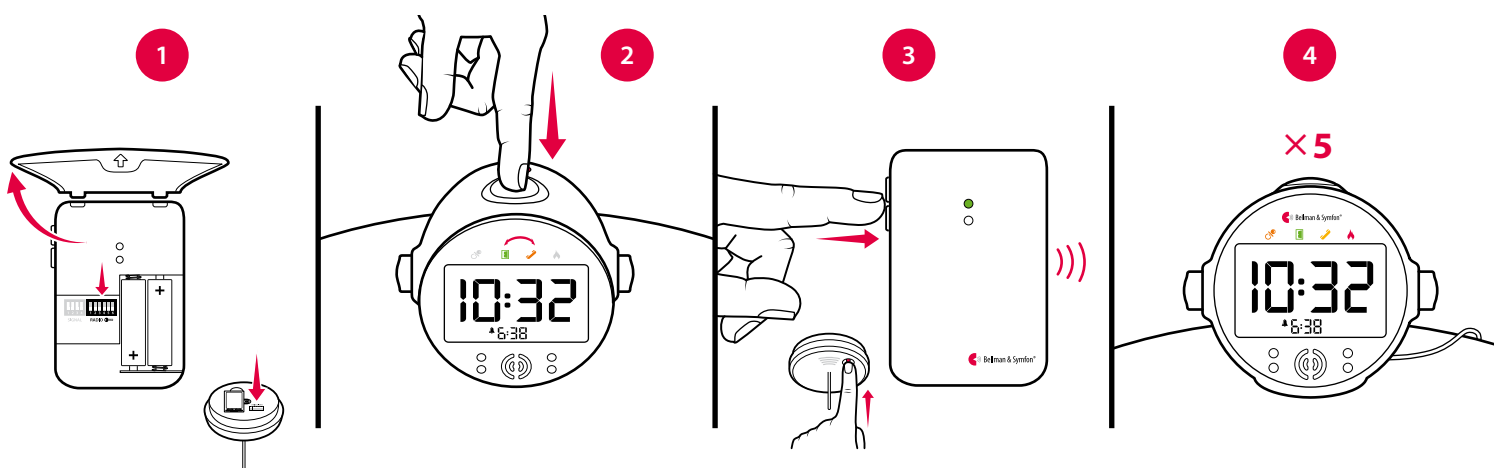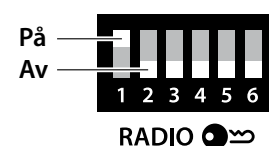- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere snooze-knappen på väckarklockan tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på klockan blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge. Notera att alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.




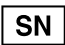
## Felsökning


Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadapern är ansluten i väggutaget.</li><li>▪ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i väggutaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Väckarklockan detekterar inga reservbatterier. Dra bort batterifliken, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>
Väckarklockan reagerar inte när en sändare aktiveras	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.</li><li>▪ Flytta väckarklockan närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>▪ Kontrollera att väckarklockan har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>
Väckarklockan aktiveras utan någon anledning	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din väckarklocka. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>
Ljudet för väckning är för lågt	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.</li></ul>


# Visit väckarklocka


## Symbolförklaring


 Med den här symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745.


 Den här symbolen anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiven 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.


 Den här symbolen indikerar att du bör läsa bruksanvisningen.

 Den här symbolen indikerar att det är viktigt att du uppmärksammar relevanta varningsmeddelanden.


 Den här symbolen indikerar viktig information för hantering och produktsäkerhet.


 Temperatur vid transport och förvaring:  $-10^{\circ}$  till  $50^{\circ}$  C  
Drifttemperatur:  $0^{\circ}$  till  $35^{\circ}$  C

 Luftfuktighet vid transport och förvaring:  $<90\%$ , ej kondenserande  
Luftfuktighet vid drift:  $15\%$  till  $90\%$ , ej kondenserande

 Atmosfäriskt tryck vid drift, transport och förvaring: 700 till 1060 hpa

**Driftsförhållanden** Den här enheten är tillverkad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inte annat anges i bruksanvisningen eller detta häfte.

 Med CE-symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd, samt RED-direktivet för radioutrustning 2014/53 / EU.

 Den här symbolen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt på därtill avsedd samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller ta med den till din audionom för lämplig bortskaffning. Genom att se till att denna produkt bortskaffas på rätt sätt hjälper du till att förhindra skador på miljön och människors hälsa.



### Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim, Sverige  
Telefon: 031 68 28 20  
E-post: info@bellman.com  
**bellman.com**



Revision: BE1580\_197MAN002-SE  
Utgivningsdatum: 2020-10-12

TM och © 2020 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.