


BE8054

SVENSKA

BE2021 Maxi Pro

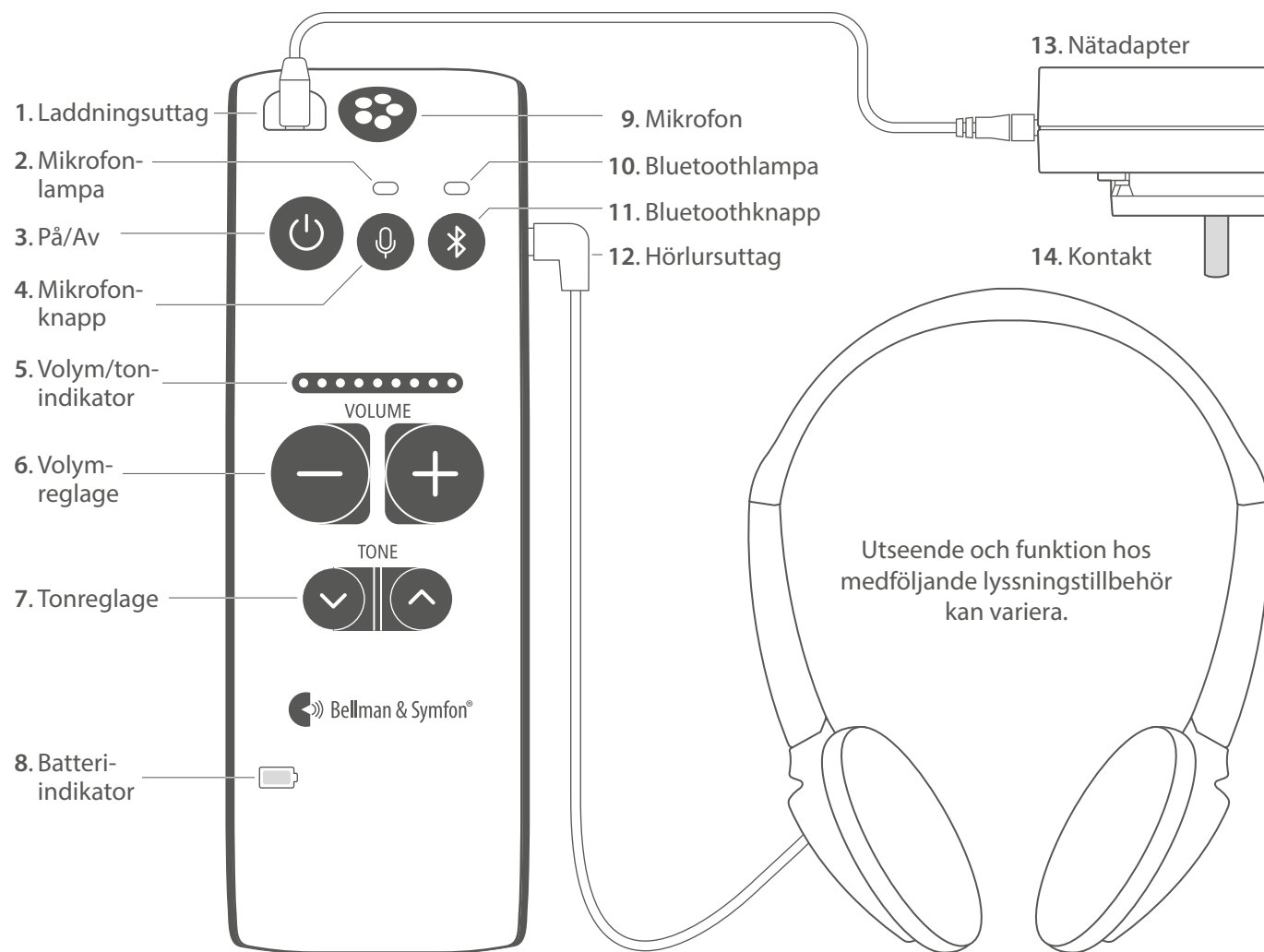

Om Maxi Pro

Maxi Pro är en digital samtalsförstärkare som framhäver tal så att du kan höra vad som sägs, klart och tydligt. Använd Maxi för att höra bättre vid samtalet runt middagsbordet, när du pratar i mobilen eller när du tittar på TV.

Komma igång

Steg 1: Ladda Maxi

- 1 Anslut laddningskabeln till nätadaptern (13) och till det gula laddningsuttaget (1) på Maxi.
- 2 Sätt i kontakten (14) i nätadaptern (13) och kontrollera att den snäpper fast ordentligt innan du sätter den i vägguttaget.
- 3 Batterilampan (8) blinkar grönt under pågående laddning. Efter ungefär tre timmar börjar lampan lysa med ett fast sken för att visa att Maxi är fulladdad.

Steg 2: Anslut hörlurar

Anslut medföljande hörlurar, headset eller halsslinga till det gröna hörlursuttaget (12) på Maxi.

Steg 3: Starta Maxi

Håll in På/Av-knappen (3) i ungefär en sekund för att starta Maxi. Mikrofonlampan (2) lyser grönt och förinställd volym visas i volym/tonindikatorn (5).

Du stänger av Maxi genom att hålla in På/Av-knappen (3) i ungefär tre sekunder tills lamporna släcks.

Använda Maxi för att förstärka tal

Lägg Maxi på bordet framför personen du samtalar med och lyssna genom hörlurarna eller hörapparaterna. Du kan också hålla Maxi i handen eller fästa den på kläderna med medföljande klämma.

Justera volymen

Tryck på **+** på volymreglaget (6) för att höja volymen och på **-** för att sänka den. Mikrofonens volym kan regleras i nio steg och volymen för TV och mobiltelefon i femton steg. Den aktuella nivån visas i volym/tonindikatorn (5).

Notera: Volymen är förinställd på låg nivå när Maxi startas för att undvika för starkt ljud.

Justera tonen

Tryck på **^** på tonreglaget (7) för att öka diskanten och på **v** för att minska den. Den kan regleras i fem steg och nivån visas i volym/tonindikatorn (5).

Tips: När du ökar diskanten förstärks konsonanterna som t.ex S, F och T så att det blir lättare att urskilja orden.

Använda Maxi med din mobiltelefon

Parkoppling

- 1 Se till att Maxi är i mikrofonläge genom att trycka på mikrofonknappen (4).
- 2 Håll in Bluetooth-knappen (11) på Maxi tills Bluetooth-lampan (10) börjar blinka blått.
- 3 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen. Ta fram Bluetooth-menyn i inställningar och välj "Maxi Pro" i listan.
- 4 Bluetooth-lampan på Maxi lyser med ett fast blått sken när parkopplingen är klar.

Notera: Om din mobiltelefon har tappat anslutningen med Maxi så kan du enkelt återansluta den genom att repetera steg 3 till 4 ovan.

Besvara ett telefonsamtal

- 1 När mobiltelefonen ringer blinkar Bluetooth-lampan (10) på Maxi blått. Alla andra ljud stängs av och du hör i stället ringsignalen i hörlurarna.
- 2 **Besvara** samtalet genom att trycka på Bluetooth-knappen (11) på Maxi eller använd fjärrkontrollen på hörlurarna.
Nu kan du höra uppringarens förstärkta röst i hörlurarna. Din röst fångas upp av mikrofonen på Maxi.
- 3 **Lägg på** genom att trycka på Bluetooth-knappen på Maxi igen.

Notera: Du kan **Avvisa** ett inkommande samtal genom att hålla in Bluetooth-knappen på Maxi i tre sekunder.

Ringa ett telefonsamtal

När du pratar i mobiltelefon så hör du den andra partens röst i hörlurarna. Din röst fångas upp av mikrofonen på Maxi.

Strömma musik

Spela upp en låt på mobilen och tryck på Bluetooth-knappen (11) på Maxi för att strömma musik.

Använda ett headset med mikrofon

När du pratar i telefon fångas ljudet upp av mikrofonen i fjärrkontrollen på headsetet istället för av Maxi.

Använda Maxi för att lyssna på TV

För att kunna strömma ljud från TV:n behöver du ha en Maxi Pro TV-sändare, se separat bruksanvisning för installation av TV-sändaren.

Lyssna på TV:n

Slå på TV:n, välj ett program och tryck på Bluetooth-knappen (11) på Maxi för att börja lyssna.

Notera: Om du får ett telefonsamtal medan du tittar på TV kommer ljudet från TV:n att stängas av så att du kan höra uppringaren ordentligt. När du lägger på återkommer ljudet från TV:n automatiskt.

Automatisk återanslutning


Maxi återansluter automatiskt till TV-sändaren så snart den är inom räckhåll, så du kan utan problem ta med din Maxi när du besöker släkt och vänner.

Batteri och laddning

Maxi har ett inbyggt laddningsbart batteri som räcker i upp till 70 timmar. När batterilampan (8) börjar blinka rött är det dags att ladda det, se **Ladda Maxi**.

Montera klämman

Placera klämman mot baksidan på enheten och tryck tills den snäpper fast. Du lossar klämman genom att dra ut de rundade greppen från sidorna.

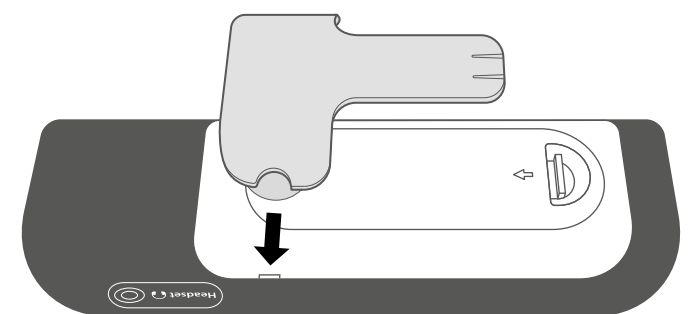

Felsökning

De flesta problem som kan uppstå kan du enkelt åtgärda genom att följa nedanstående tips.

Om	Testa följande
Ingenting händer när jag håller in På/Av-knappen på Maxi.	<ul style="list-style-type: none">Batteriet är urladdat. Ladda enheten, se Ladda Maxi.
Batterilampan på Maxi blinkar rött.	<ul style="list-style-type: none">Batteriet är nästan urladdat. Ladda Maxi, se Ladda Maxi.
Jag hör inget ljud i hörlurarna trots att Maxi är på.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera först att volymen inte är för hög och sedan att hörlurskontakten är ordentligt ansluten till hörlursuttaget (12) på Maxi.Höj volymen gradvis genom att trycka på + på volymreglaget (6).Anslut hörlurarna till någon annan enhet, till exempel en mobiltelefon, och kontrollera om du hör något ljud. Om inte, kan det vara nödvändigt att byta ut hörlurarna.Om Bluetooth-läge har valts, kontrollera att TV-sändaren eller mobiltelefonen är inom räckhåll, att enheten är parkopplad med Maxi och att den strömmar ljud.
Jag kan inte höra mobiltelefonen i mina hörlurar.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen och att telefonen är parkopplad med Maxi. Se Parkoppling i avsnittet Använda Maxi med mobilen.
Jag kan inte höra TV:n i mina hörlurar.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att att TV:n är på, att Maxi är inom räckhåll för TV-sändaren och att enheterna är parkopplade. Se Parkoppling i avsnittet Använda Maxi för att lyssna på TV.
Ljudet från TV:n eller mobiltelefonen är för lågt, trots att volymen på Maxi är på högsta nivå.	<ul style="list-style-type: none">Försök att istället höja volymen på din TV eller mobiltelefon.
Ett tjutande ljud hörs i hörlurarna.	<ul style="list-style-type: none">Sänk volymen eller öka avståndet mellan Maxi och hörlurarna.Rikta mikrofonen (9) på Maxi bort från dig.
Maxi verkar ha hängit sig.	<ul style="list-style-type: none">Håll in På/Av-knappen (3) i tio sekunder tills Maxi stängs av.Håll in På/Av-knappen i ungefär en sekund för att starta Maxi.

Skötsel och underhåll

Användning

Notera: Maxi Pro kan generera mycket höga ljudnivåer. Öka därför volymen gradvis till en nivå som känns behaglig att lyssna på. Exponering för höga ljudnivåer kan skada din hörsel.

Förvara smådelar utom räckhåll från barn.

Använd produkten i en torr miljö där temperaturen alltid ligger mellan 0 och 35 °C.



Rengöring

Torka av produkten med en mjuk luddfri trasa. Undvik att fukt tränger in i öppningarna.

Service och garanti

Om produkten ser ut att vara skadad eller inte fungerar som den ska, följ instruktionerna i detta häfte. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din lokala återförsäljare för information om service och garanti.

BE2022 Maxi Pro TV-sändare

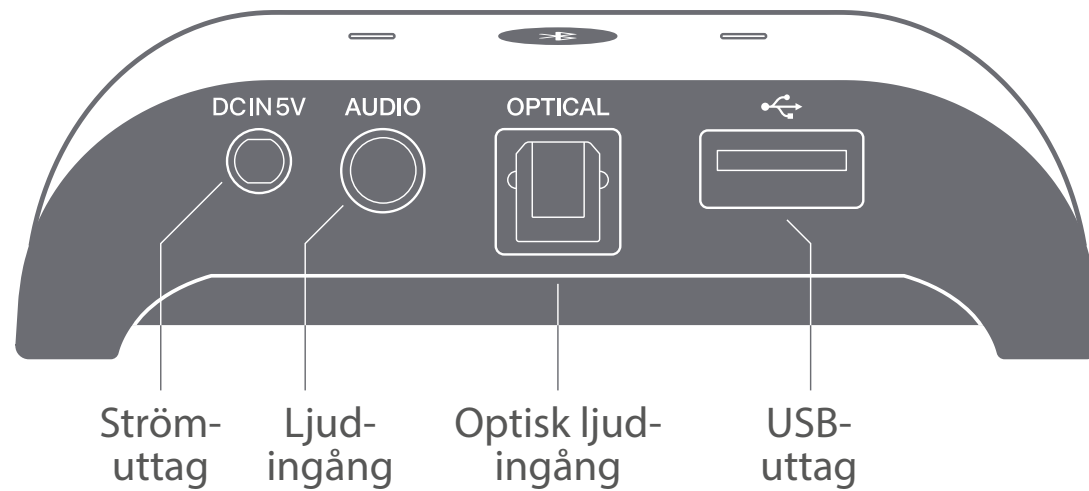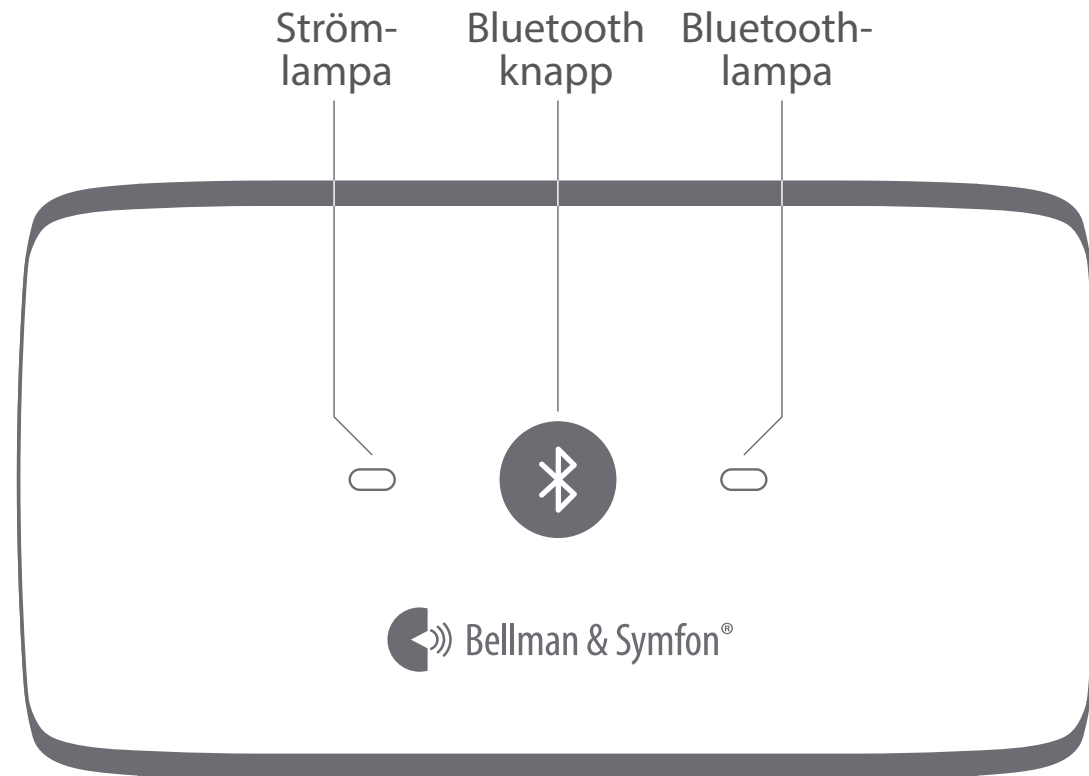


Om TV-sändaren

Med Maxi Pro TV-sändare kan du justera volymen på TV:n till en nivå som passar dig, utan att volymen påverkas för andra personer i rummet. TV-ljudet strömmas i stereo via Bluetooth till din Maxi Pro samtalsförstärkare.

I paketet


Utöver TV-sändaren medföljer även:
En mini-stereokabel

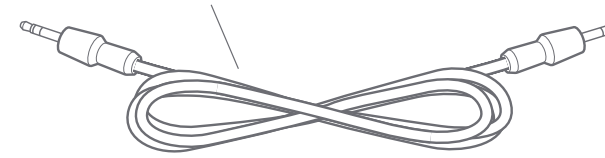


En mini-stereo-till-RCA-adaptör



En fiberoptisk kabel

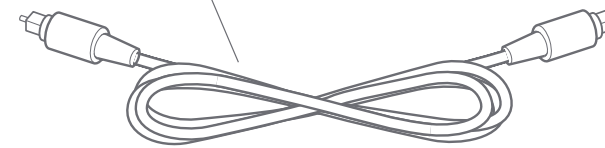


En strömkabel med USB-kontakt

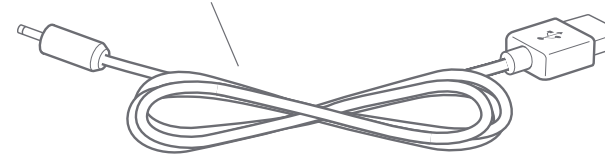

Vad du behöver för att komma igång

För att installera TV-sändaren behöver du också:

En TV med en RCA-, hörlurs- eller optisk ljudutgång

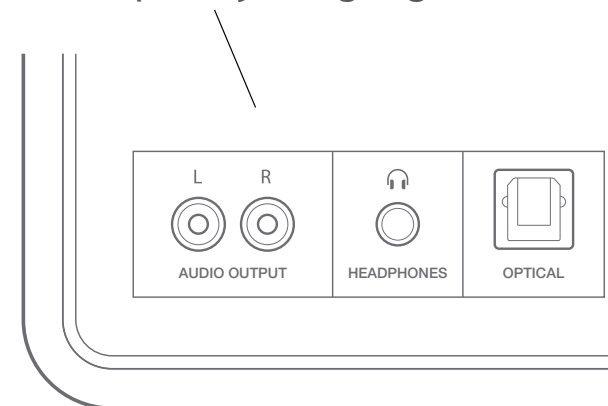

En Maxi Pro samtalsförstärkare



Installera TV-sändaren


Steg 1: Koppla in ljudet

TV-sändaren kan anslutas till TV:n på flera sätt. Det beror på vilka ljudutgångar som finns på din TV.

Använda RCA-utgången på TV:n

- 1 Anslut ena änden av mini-stereokabeln till ljudingången på baksidan av TV-sändaren.
- 2 Anslut den andra änden till mini-stereo-till-RCA-adaptern.
- 3 Anslut RCA-kontakterna till ljudutgången på TV:n.

Tips: Det går också att ansluta den andra änden av mini-stereo-kabeln direkt till hörlursutgången på TV:n. Detta kan stänga av högtalarna på vissa TV-modeller.

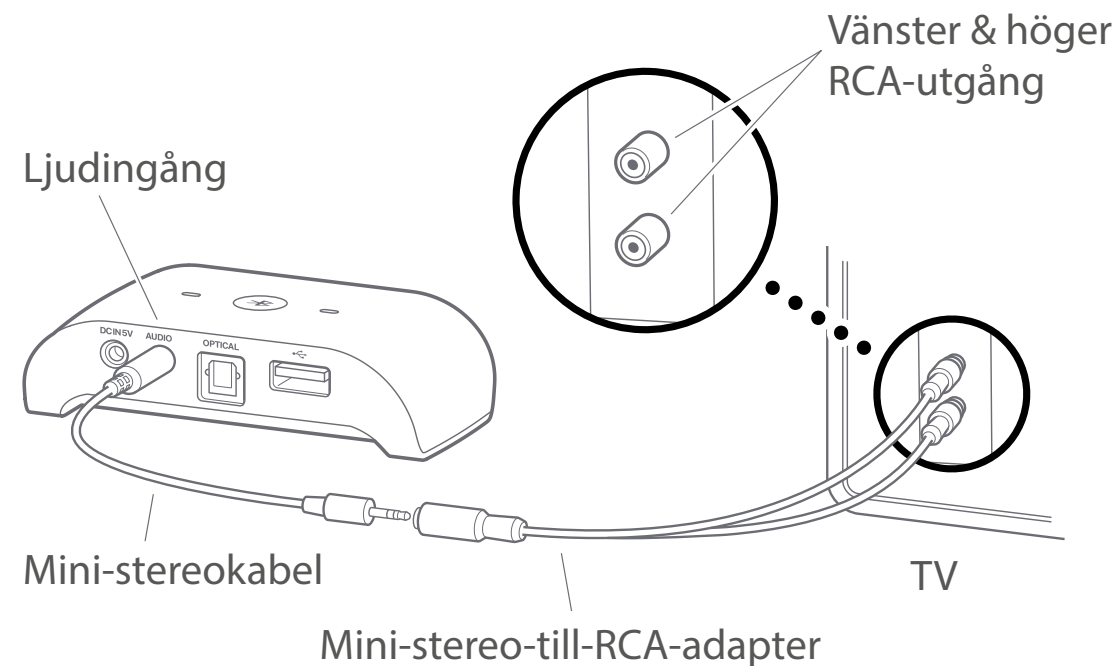


Använda den optiska ljudutgången på TV:n

Om din TV har en optisk ljudutgång kan du använda den fiberoptiska kabeln för att ansluta TV-sändaren. Gör så här:

- 1 Anslut ena änden av kabeln till den optiska ljudingången på baksidan av TV-sändaren.
- 2 Anslut den andra änden till den optiska ljudutgången på TV:n.


Fiberoptisk kabel

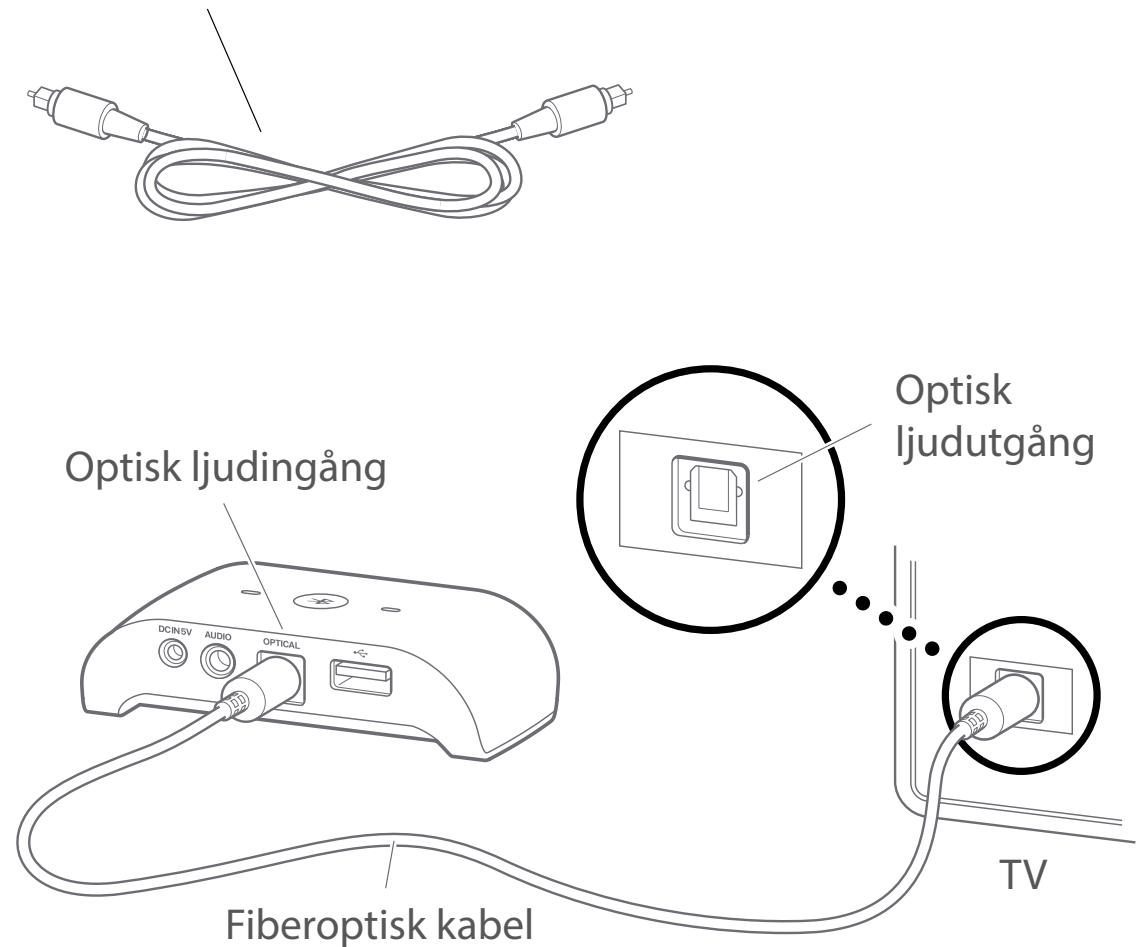

Steg 2: Ansluta strömkabeln

- 1 Anslut strömkabeln till strömuttaget på baksidan av TV-sändaren.
- 2 Anslut USB-kontakten till nätadaptern.
- 3 Sätt i stickproppen i nätadaptern och kontrollera att den sitter fast ordentligt innan du sätter den i vägguttaget. Strömlampan på TV-sändaren börjar lysa grönt.

Tips: Det går också att ansluta USB-kontakten direkt till ett USB-uttag på TV:n.

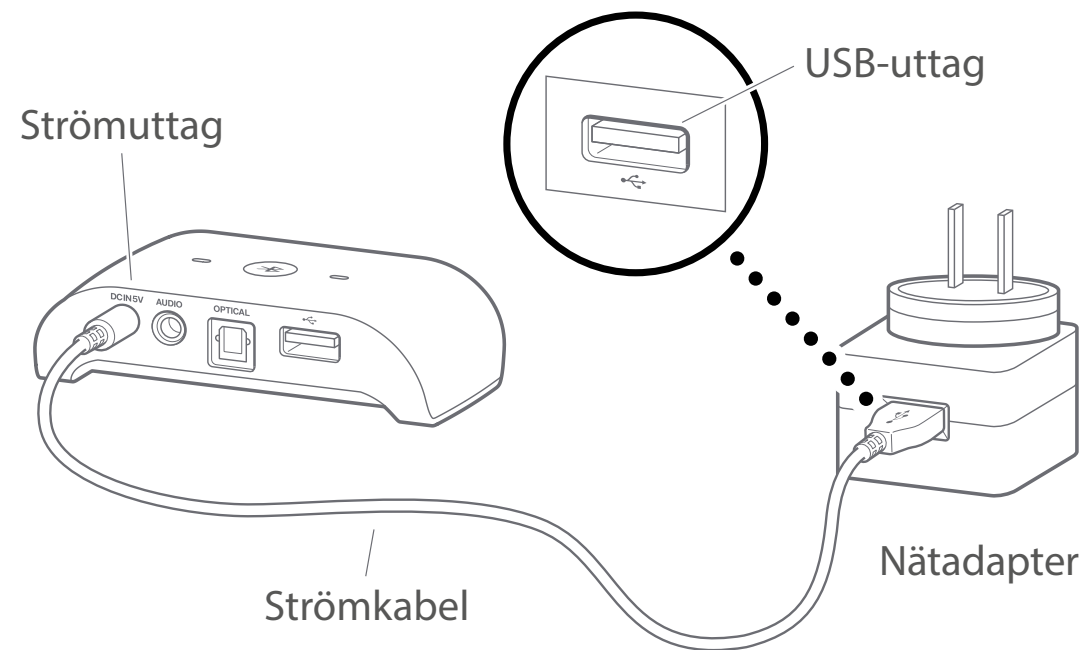

Steg 3: Parkoppling

Notera: Om TV-sändaren levererats tillsammans med din Maxi behöver du inte parkoppla enheterna.

- 1 På TV-sändaren: Håll in Bluetoothknappen tills Bluetoothlampan börjar blinka blått.
- 2 På Maxi: Tryck kort på mikrofonknappen. Håll in Bluetoothknappen tills Bluetoothlampan börjar blinka blått.
- 3 Båda Bluetoothlamporna lyser med ett fast blått sken när parkopplingen är klar.

Använda TV-sändaren

Starta


- 1 TV-sändaren startar så snart den anslutits till ström. Strömlampan börjar då lysa grönt för att visa att den är påslagen.
- 2 Vid uppstart ansluter TV-sändaren automatiskt till Maxi Pro. Bluetoothlamporna lyser då blått på båda enheter för att visa att de är parkopplade.

Notera: TV-sändaren är alltid påslagen när den är strömansluten. Om du skulle ta med dig din Maxi Pro utanför hemmet, återansluts den automatiskt så snart du befinner sig inom Bluetooth-räckvidd.

Ladda Maxi Pro

Du kan ladda Maxi Pro från din TV-sändare. Gör så här:

- 1 Ta fram laddningskabeln till Maxi Pro. Anslut USB-änden till USB-laddningsporten på TV-sändaren.
- 2 Anslut den andra änden till det gula laddningsuttaget på Maxi Pro samtalsförstärkare.
- 3 Batterilampan på Maxi blinkar grönt under pågående laddning.

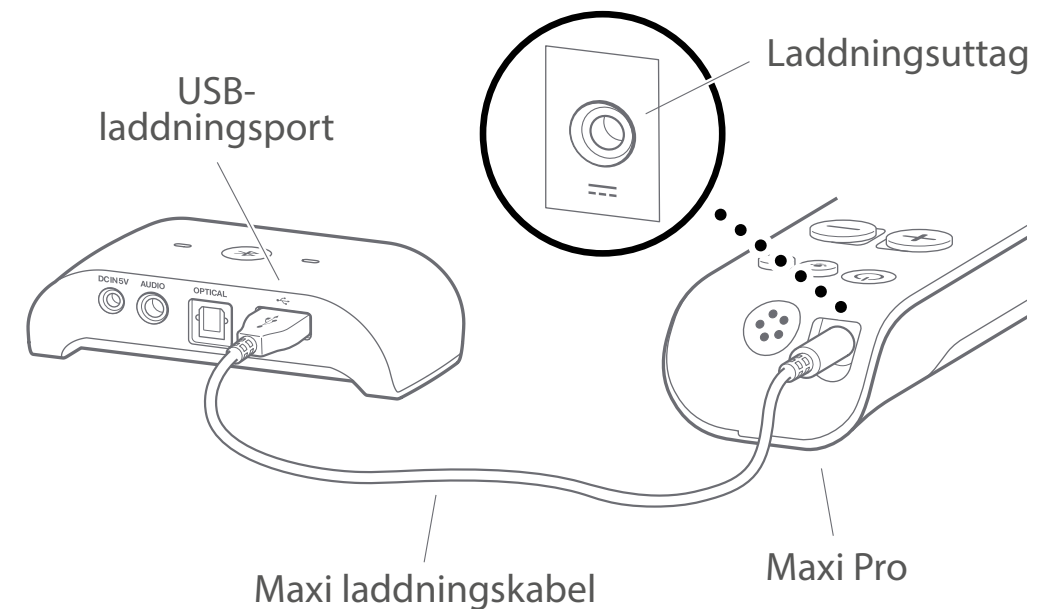

Felsökning

Om	Testa följande
Inget händer när jag trycker på Bluetooth-knappen på TV-sändaren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att TV-sändaren är strömansluten, se Ansluta strömkabeln.
Jag kan inte höra TV:n i mina hörlurar.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att Maxi Pro är inom räckvidd och parkopplad med TV-sändaren, se Par-koppling.
Ljudet från TV:n försvinner när jag ansluter mini-stereokabeln till hörlursutgången.	<ul style="list-style-type: none">• Vissa TV-modeller fungerar på detta sätt. Använd istället TV:ns RCA- eller optiska ljudutgång, se Koppla in ljudet.

Skötsel och underhåll

Använd produkten i en torr miljö där temperaturen alltid ligger mellan 0 och 35 °C.

Torka av produkten med en mjuk luddfri trasa. Undvik att fukt tränger in i öppningarna. Använd inte fönsterputs- medel, rengöringsmedel, sprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipande medel.

Om produkten ser ut att vara skadad eller inte fungerar som den ska, följ instruktionerna i detta häfte. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din lokala återförsäljare för information om service och garanti.

DESIGN FOR EARS™

Huvudkontor

Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim, Sverige
Telefon 031 68 28 20
E-post info@bellman.com

Revision: BE2021_088MAN001
Revision: BE2022_044MAN002
Date of issue: 2020-07-01
TM and © 2020 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.