


Maxi

個人交流器

說明書

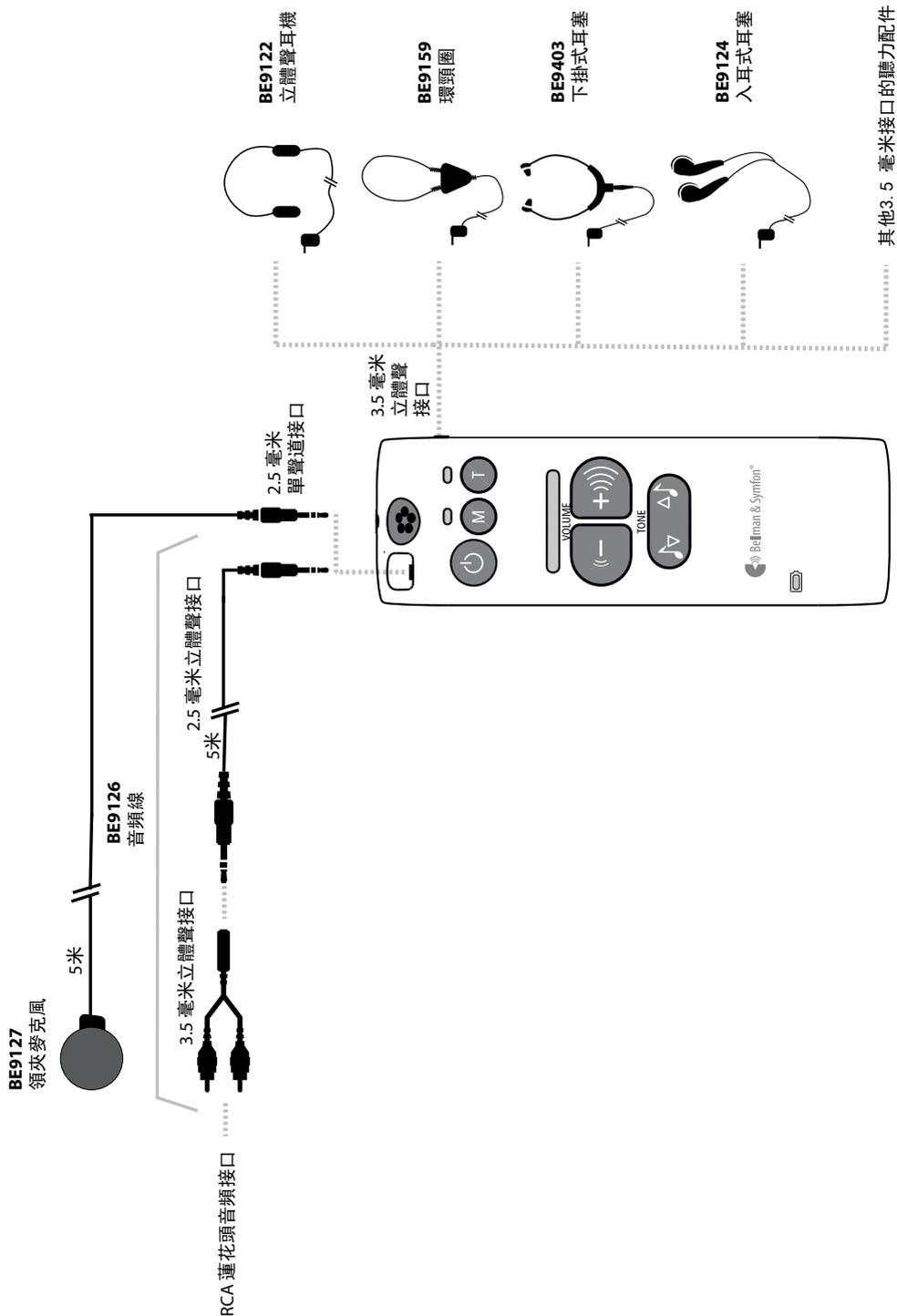

Bellman Audio Maxi 個人交流器 BE2020

非常感謝您選擇瑞典貝爾曼 Bellman & Symfon 的產品。

Bellman Audio Maxi 個人交流器可以讓人們與別人進行交談、看電視、聽音樂，還可以接收電感環路場所的廣播等，幫助人們更好地享受聆聽質量，提升自己的生活品質。

使用本產品前，請首先閱讀說明書。

產品配件連接圖請參考封面內頁。

產品編號及圖例請參考封底內頁。

開始

打開包裝，安裝，測試 打開包裝

1. 按照箭頭方向按下電池蓋卡口 (16)，打開電池後蓋 (17)。根據電池蓋 (14) 內圖例，正確安裝電池。僅限使用5號 (AA) 碱性電池，不要使用強力推壓。合上後蓋，聽到“咔”的聲響表示已關好。
2. 把 BE9122 耳機，BE9159 環頸圈，BE9403 下掛式耳塞，BE9124 耳塞或是其它 Bellman & Symfon 推薦產品連接到右手邊綠色耳機插口 (12)。
3. 按下 ⊙ 鈕(5)打開 Maxi，此時麥克風 ⊕ 鈕 (6) 和電感 ⊕ 鈕 (7) 上的小燈 (3、4) 會同事閃亮。

Maxi 總是以內置麥克風 (2) 作為聲源打開的。開機時默認音量為小音量，以免音量過大。

使用音量調控 ⊖ ⊕ (9) 控制音量大小。⊕ 調大 ⊖ 調小音量。音量、音調條形燈 (8) 顯示聲音大小。音量越大亮燈越多。為了節約用電，燈亮 3 秒后自動關閉。

使用音調調控 ⊕ ⊖ (10) 調整音調高低。⊕ 調高 ⊖ 調低音調。音量、音調條形燈 (8) 顯示音調高低。音調越高亮燈越多。為了節約用電，燈亮 3 秒后自動關閉。

使用完畢，按下 ⊙ 鈕 (5) 關閉。

功能

Bellman Audio Maxi BE2020 是一款個人交流器。它是專門用於特殊情況下提供良好聲音的設備。特別是談話聲和音樂，經內置及外置麥克風 (輔件) 或是其它外部聲源傳導，Maxi 表現尤為出色。

內置麥克風

內置麥克風 (2) 位於產品前部頂端的橡膠圈內。該麥克風全向收集聲音。

電感

內置電感以45度的角度斜立以便在平放狀態下 (手持、在桌上) 或是垂直狀態 (夾著或掛著) 均能接收感應信號。

電感檔用於在已安裝感應環路的範圍內。尋找感應環路的標識 (如右上圖), 必要時可向工作人員詢問。



選擇聲源

聲源的選擇很簡單：

- 用戶可以通過按 **M** 鈕 (6) 選擇內置麥克風 (M狀態)、或 **T** 鈕 (7) 選擇電感信號。聲源切換時音量自動調小, 以免音量過大。
- 當接入延長麥克風時, Maxi 會自動轉換至外部聲源。當斷開連接時, 內置麥克風 (M狀態) 自動打開。

外部聲源

如果將聲源 (電視、音響、MP3 播放器等) 通過轉換線 (配件 BE9126) 與紅色 2.5 毫米插口 (1) 相連, 該聲源則會被選擇, 輸入敏感度也會自動調節到最適合狀態, 此時內置麥克風 (2) 自動切斷。


聯合信號源

當外部聲源連接到外部聲源插口 (1) 時, 這一聲源在按住 **M** 鈕 (6) 按鈕時可以與內置麥克風 (2) 聯合使用。



連接外部聲源時, 比如看電視時, 按住 **M** 鈕, 即可與人交談, 此時外界聲源音量自動低。麥克風上方的顯示燈 (3) 亮起。

放開 **M** 鈕 (6), 外部聲源自動恢復原來狀態, 即收聽外部聲源 (1)。

腰夾

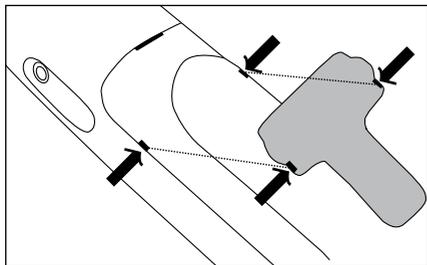

腰夾按圖示對準兩個小缺口用力按下。

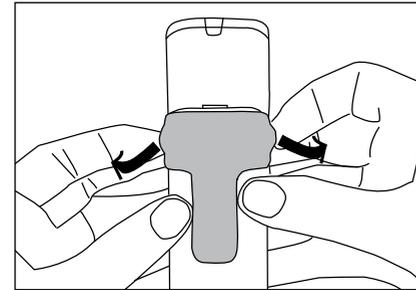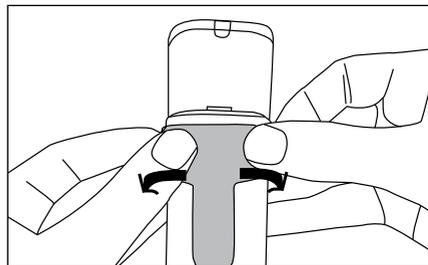

用手指輕輕掰開腰夾兩側即可將其取下。

指示燈與設置

音量、音調指示燈

音量、音調指示條形燈 (8) 指示音量及音調的位置。

為了節約用電, 燈亮 3 秒后自動關閉。

電源指示燈

電源指示燈 (11) 通常情況下不亮, 只有當電力不足時 (小於 10 小時工作時間, 根據聲音大小等使用情況會有所不同) 該燈亮起。

電力不足提示燈 (11) 每 7 秒鐘閃爍一次時, 應該更換電池。僅限使用 5 號 (AA) 碱性電池。

音量控制

Maxi 數碼音量控制鈕 **+** **-** (9) 按下 **+** 鈕音量變大, 按下 **-** 鈕音量變小。

按住音量調節鈕一秒鐘以上, 音量就會以每秒一個亮燈的速度升高或降低, 直到達到最大或最小音量。

一下下地按 **+** 鈕 (9), 音量逐漸地變大, 直到最大音量, 此時音量、音調指示條形燈 (8) 全部亮滿。

一下下地按 **-** 鈕 (9), 音量逐漸地變小, 直到最小音量, 此時音量、音調指示條形燈 (8) 只有最左邊的一個小燈亮起。

音調控制

該型號 BE2020 數碼音調控制鈕 **↑** **↓** (10)、按下 **↑** 鈕音調變高, 按下 **↓** 鈕音調變低。

按住音調控制鈕一秒鐘以上, 音調就會以每秒一個亮燈的速度升高或降低, 直到達到最高或

最低音調。

一下下地按  鈕 (10)，音調逐漸地變高，直到最高音調，此時音量、音調指示條形燈 (8) 全部亮滿。

一下下地按  鈕 (10)，音調逐漸地變低，直到最低音調，此時音量、音調指示條形燈 (8) 只有最左邊的一個小燈亮起。


當音量、音調指示條形燈 (8) 的小燈在中央時，音調為原調。

簡單故障處理

症狀	解決
按下開關時 Maxi 沒反應。	更換電池，僅限使用 5 號 (AA) 碱性電池。
當 Maxi 處於打開狀態時，聽不到耳機裡的聲音。	確定所選檔，比如麥克風 (M 狀態)。

编号参考 編號參考

- | | |
|---|--|
| 1. 外部聲源2.5毫米插口 | 10. 音調控制按鈕   |
| 2. 內置麥克風 | 11. 電源指示燈 |
| 3. 麥克風指示燈 | 12. 3.5毫米耳機插口 |
| 4. 電感指示燈 | 13. 掛繩孔 |
| 5. 開關按鈕  | 14. 電池倉 |
| 6. 麥克風按鈕  | 15. 設置按鈕 |
| 7. 選擇電感按鈕  | 16. 電池蓋卡口 |
| 8. 音量、音調指示條形燈 | 17. 電池蓋 |
| 9. 音量控制按鈕   | 18. 腰夾 |

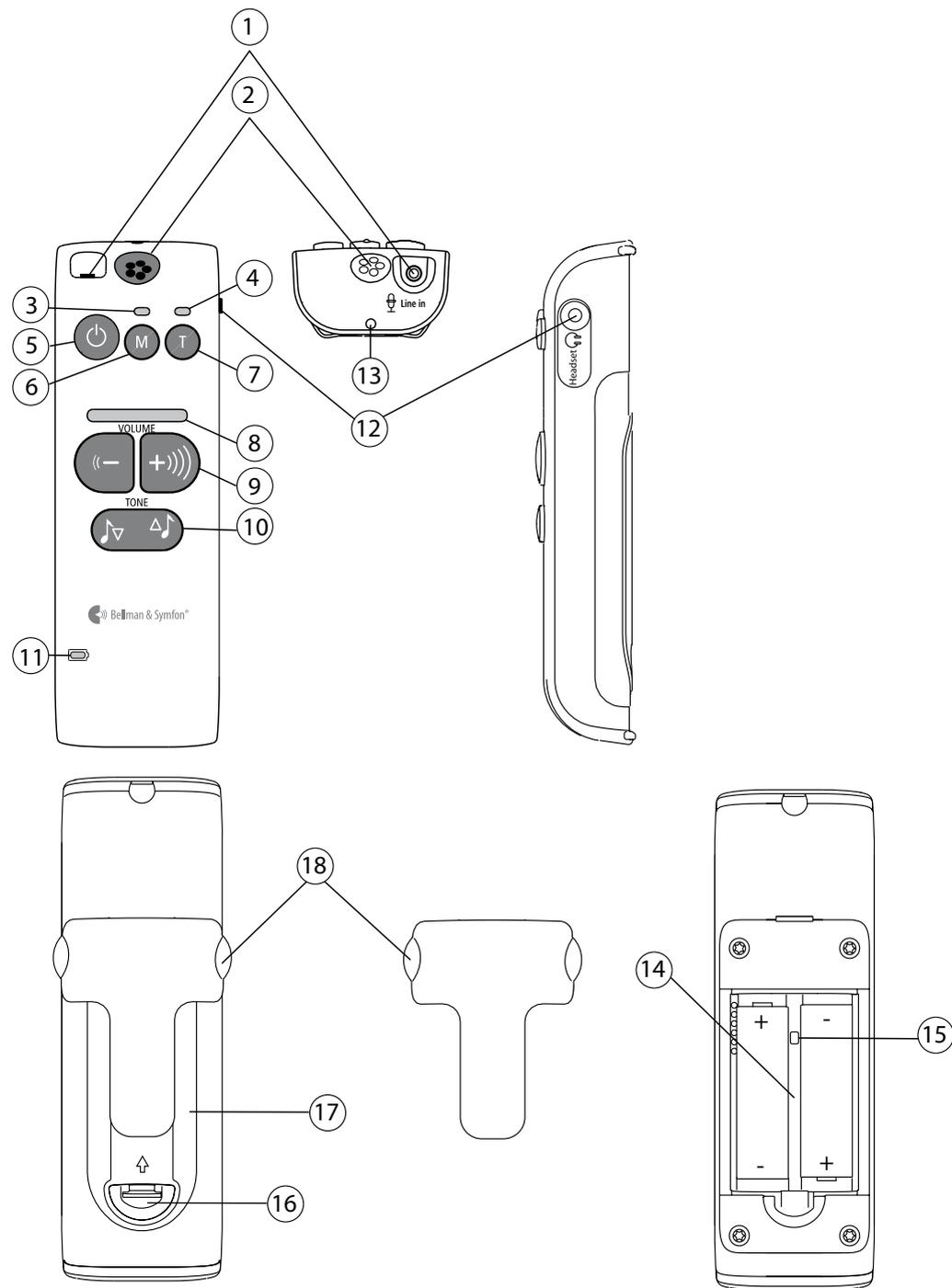

 請注意：Bellman Audio Maxi BE2020 不是助聽器。
Bellman & Symfon Group AB 建議任何有聽力損失的人士應該問醫生諮詢。

DESIGN FOR EARS™

歐洲總部

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30,
436 32 Askim
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.com

亞太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
廣東省廣州市越秀區環市東路339號
廣東國際大廈主樓 1401-06室
郵編：510095
電話：020 8318 2950
傳真：020 8333 5528
郵箱：info.cn@bellman.com

© 2020 Bellman & Symfon AB, 保留所有權利。Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 的商標已為 Bellman & Symfon 註冊。



微信公眾號



Bellman官網

BE2020_005/MAND19