

noizezz



ÅTERANVÄNDBARA  
ÖRONPROPPAR

ORANGE  
mycket

GARANTI

VARNING

noizezz



ÅTERANVÄNDBARA  
ÖRONPROPPAR

ORANGE  
mycket

- Rekommenderas för dig som kör motorcykel eller använder elektriska verktyg i huset eller i trädgården.
- Unika filter som släpper igenom tal och viktiga varningssignaler.
- Bra passform - sitter bekvämt utan att skava. Inkluderar fyra olika storlekar; S, M, L och XL.\*
- Diskret design helt utan utstickande delar.
- Ger ingen instängd känsla.

Läs instruktionerna i bruksanvisningen noga innan du använder produkten så att du kan få ut det mesta av dina NOIZEZZ. Spara bruksanvisningen tillsammans med förpackningen.

Garantin gäller i 2 år från dagen för köpet hos någon av våra återförsäljare.

Garantianspråk kan endast göras hos återförsäljare mot uppvisande av originalkvitto.

Garantin täcker inte normalt slitage eller skador orsakade av felaktig användning eller ljudläckage.

\*Storlek i diameter på medföljande silikonproppar:

S = 7-8 mm

M = 8-9 mm

L = 9 mm

XL = 9-10 mm

Observera att den här produkten innehåller smådelar. Se till att förpackningen och smådelarna förvaras utom räckhåll för barn.

Använd alltid öronpropparna under hela tiden vid exponering för skadligt buller. Förvara NOIZEZZ i medföljande metalletui när du inte använder dem.

Kontrollera regelbundet att dina NOIZEZZ fungerar som avsett. Notera att öronpropparnas effekt kan försämrans rekommendationer i denna bruksanvisning inte följs.

För mer information om NOIZEZZ kontakta:

#### Bellman & Symfon

Södra Långebergsgatan 30


421 32 Västra Frölunda

Tel 031 68 28 20

Fax 031 68 28 90

Epost info@bellman.com


Webb bellman.com/skydd

 Bellman & Symfon®

 CRITT-France  
Nr. 0501-123715905100106  
EN 352-2:2002  
Tillverkade för Bellman & Symfon  
av NOIZEZZ BV Hoofddorp, Holland



Håll dig uppdaterad om de senaste produkterna från Bellman & Symfon på [bellman.com/skydd](http://bellman.com/skydd).

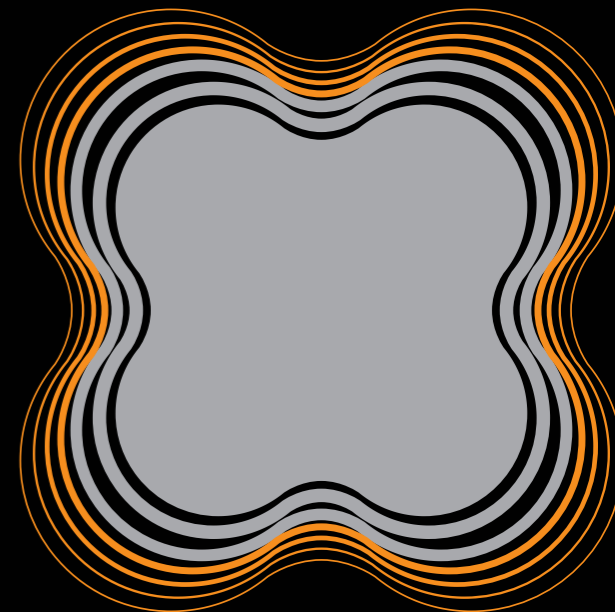

## INSTRUKTIONER SÅ ANVÄNDER DU NOIZEZZ

### Steg 1: Hitta rätt storlek

Börja med den största storleken **XL** och prova dig ner till den storlek som känns bekväm för din hörselgång. Du har fyra olika storlekar att växla mellan: S, M, L och XL. Du hittar storleksindikeringen på den konformade delen på varje skydd.

Placera skyddet mellan tummen och pekfinger enligt **bild 1** och rikta skyddet mot örat enligt **bild 2-3**.

För försiktigt in proppen i hörselgången med filken riktad framåt enligt **bild 4**. Känn samtidigt efter hur hörselskyddet passar ditt öra. Prova en mindre storlek om det känns för stort eller sticker ut ur örat. Gör vid behov om detta tills hela hörselskyddet sitter bekvämt och utan att sticka ut, se **bild 6**.

**Obs!** Börja alltid med den största storleken och växla till en mindre vid varje försök tills du hittar den storlek som sitter bekvämt men som fortfarande tätar bra i örat.

### Steg 2: Ta ut hörselskydden

Att ta ut dina NOIZEZZ går till så här: Placera försiktigt filken mellan tumme och pekfinger och dra ut hörselskyddet med en mjuk rörelse.



**Bild 1**  
Håll skyddet så här



**Bild 2**  
Vänster öra



**Bild 2**  
Höger öra



**Bild 4**  
Rikta filken framåt



**Bild 5**  
Sätt i filter



**Bild 6**  
På plats i örat

### Steg 3: Sätta in filter

Du sätter själv enkelt i filtret. Håll försiktigt i kanten på filtret med nageln och tryck in det i filterhålet som sitter på hörselskyddets utsida precis bredvid filken enligt **bild 5**. Kontrollera en sista gång att skyddet sluter tätt i örat.

Frekvens, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning, dB	17,6	18,0	18,7	20,1	23,5	27,9	23,5	22,6
Standardavvikelse, dB	4,7	4,4	5,1	3,6	3,7	5,5	3,7	5,9
APV, dB	12,9	13,6	13,7	19,8	17,9	22,3	19,8	16,7

Mätvärden, dB    H 20,0    M 18,4    L 15,8    SNR 20,1

APV = Förväntad skyddseffekt  
H = Dämpvärde för höga frekvenser  
M = Dämpvärde för mellanfrekvenser  
L = Dämpvärde för låga frekvenser  
SNR = Enkelvärde för dämpning

## RENGÖRING & UNDERHÅLL

För att säkerställa öronpropparnas hållbarhet rekommenderar vi att du tvättar dina NOIZEZZ regelbundet. Använd en mjuk trasa eller näsduk för att ta bort öronvax. Ta ut filtren och tvätta utsidan med ljummet vatten och en mild tvål.



**Produkten kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information kan fås av tillverkaren.**



**För inte in vassa föremål i filtret då det kan skadas.**



**Effekten kan försämrats av felaktig användning eller försummat underhåll**